

Manual de uso Silla de ruedas



Rehacare SPA

Las Dalias 3193, Macul,
Santiago, Chile
+56 2 2237 1761
info@rehacare.cl
www.rehacare.cl

Felicitaciones por elegir una silla de ruedas Müller. Nosotros hemos fabricado cuidadosamente su silla de ruedas de manera de satisfacer los más altos estándares de seguridad y calidad.

Para mantener esta seguridad y calidad a través del tiempo, le rogamos leer atentamente las siguientes recomendaciones de seguridad, uso y mantenimiento. Los datos o figuras del presente manual pueden ser distintos a los del producto que usted ha adquirido, no atendiéndose a ninguna reclamación basada en dichos datos o figuras.

El diseño y construcción de la silla han sido realizados para garantizar la máxima seguridad del usuario, sin embargo, estos pueden ponerse en peligro si las sillas son utilizadas de forma inapropiada. Por su propia seguridad, siga las siguientes recomendaciones:


Seguridad

- Compruebe antes de cada uso que sus principales componentes funcionan y están bien asegurados. Según el modelo de silla, revise entre otros sistemas el eje desmontable de las ruedas traseras, la presión en los neumáticos, los frenos, las fijaciones de los cinturones o pecheras, el anclaje de los apoya brazos y la fijación del tubo distanciador del respaldo reclinable.
- Configure el centro de gravedad para evitar volcamientos en pendientes, cuestas o para sortear obstáculos. Si desea alcanzar un objeto, no se incline demasiado ni se aleje del respaldo, ya que si modifica el centro de gravedad puede provocar volcamiento.
- Evitar las escaleras mecánicas, terrenos cubiertos de barro o arena, pendientes de más de 10° y terrenos con baches, ya que puede provocar caídas o el mal funcionamiento de sus componentes.
- Utilice su silla de ruedas sobre piso firme y parejo, ya sea tanto en interiores como en exteriores, considere buenas condiciones de visibilidad.
- No sobrecargue la silla, ésta ha sido diseñada sólo para una persona sentada.
- Ponga especial atención en los lugares de paso estrechos para no hacerse daño en las manos.
- La propulsión de la silla de ruedas debe hacerse mediante los anillos de comando, o bien por un tercero con los bastones de empuje ubicados en el respaldo. Evite propulsiones con empujones, o tirando de la silla de un lugar inapropiado. No se propulse desde los rayos de las ruedas.
- Los movimientos bruscos hacia adelante, atrás y a los lados aumentan considerablemente el riesgo de volcamiento.
- Frene la silla antes de trasladar una persona hacia o desde la silla de ruedas. Procure dejar frenada la silla cuando no la utilice y cuando se traslada al interior de un vehículo.
- Antes de cada traslado suba las paletas apoya pie para dejar despejado el ingreso a la silla. Nunca se debe apoyar en las paletas apoya pies, ya que corre el riesgo de volcar la silla de ruedas.
- Cuando los anillos de comando están estropeados deben cambiarse para evitar posibles accidentes en las manos.
- No levante nunca la silla de ruedas por los apoya brazos, los apoya pies o cualquier otra pieza desmontable.
- Procure llevar periódicamente su silla de ruedas a mantenimiento a los servicios técnicos autorizados por la empresa REHACARE.
- La adaptación o ajuste no profesional o inapropiado pueden aumentar el riesgo de accidentes. El producto deberá ser utilizado bajo las condiciones especificadas o con los fines indicados. Por favor no instale ni utilice componentes fabricados por terceros no aprobados por nuestra empresa, de lo contrario quedará sujeto a riesgos de accidentes, y la garantía del producto quedará anulada.
- Los usuarios con amputación deben usar su silla con antivuelcos, y/o pletina de amputados.
- Es posible que los productos mostrados y descritos en este manual no sean exactamente iguales, hasta el último detalle, al modelo que usted posee. No obstante, todas las instrucciones aquí proporcionadas pueden aplicarse perfectamente más allá de las diferencias de detalles.
- El fabricante se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los pesos, medidas y otros datos técnicos descritos en este manual. Todas las medidas y especificaciones indicadas son aproximadas y no constituyen detalles técnicos.


1 Desplegar Silla



Tome la silla de los protectores laterales (apoya brazos o guarda-fango) y tire hacia afuera hasta dejar la silla semi-abierta.

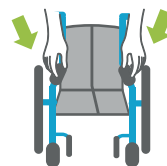

Coloque las manos sobre los extremos superiores del asiento. No las ubique bajo el asiento, ya que corre el riesgo de que se golpeen y queden atrapadas.

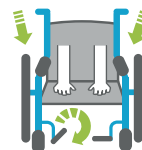


Empuje hacia abajo los extremos del asiento hasta encajar el asiento en los descansos plásticos en ambos lados de la silla.


2 Plegar Silla



Antes de plegar la silla, levante ambos apoya pies hasta que topen en el marco.

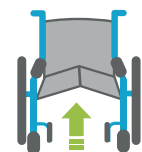

Para plegar la silla, tome el textil del asiento desde sus extremos delantero y trasero.

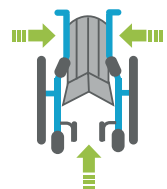

Tire del textil del asiento hacia arriba hasta plegar completamente la silla.

3 Apoya brazos



Para abatir el apoya brazo hacia atrás, destrabe primero el seguro, pulsando hacia adelante la aleta de seguridad y levantando levemente al apoya brazo.



Tome el apoya brazo con su mano y llévelo hacia atrás, hasta que alcance la posición vertical.



Realice el movimiento inverso para cerrar, asegurándose de calzar perfectamente el seguro.

4 Frenos



Para frenar, tome las palancas ubicadas en ambos lados de la silla.




Presione hacia adelante y abajo hasta que se traben los frenos.



Para liberar los frenos tire de las palancas hacia arriba y atrás.

5 Piernera batiente

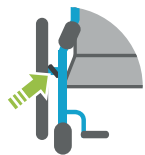

Destrate primero el seguro de la piernera, pulsando hacia adentro la aleta de seguridad.



Sujete el tubo con la mano y tire ligeramente hacia arriba para liberar la piernera.



Una vez liberada la piernera, puede rotarla hacia el interior o exterior, o bien sacarla completamente tirando hacia arriba.

6 Piernera regulable en ángulo



Para elevar la piernera, con una mano presione la aleta de seguridad hacia el tubo de la piernera, y con la otra mano tire del tubo elevándolo.




Para bajar la piernera, presione la aleta de seguridad hacia el tubo de la piernera, y con la otra mano empuje el tubo hacia abajo.




Antes de plegar la silla, gire el soporte de pantorrilla hacia afuera y levante los apoyos de los pies.

7 Ruedas

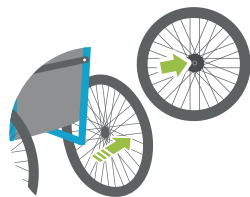

En el caso de ruedas con eje desmontable, para desmontar la rueda presione el botón ubicado en el eje y tire de la rueda hacia afuera.

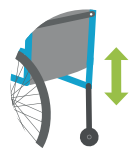

Para usar las ruedas de tránsito tire el anillo hacia afuera ajustando la rueda a la altura deseada.




Para ajustar la rueda antivuelco presione el botón de seguridad y baje la rueda casi a la altura del suelo.

8 Respaldo regulable en ángulo



Apriete la manilla para liberar el sistema de respaldo elevable, ajuste la inclinación deseada y suelte la manilla.

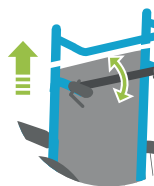

Antes de doblar la silla, desmonte cabezal presionando los botones en los costados, luego suelte la perilla plástica y eleve el tubo estabilizador que conecta ambos extremos del respaldo.

9 Respaldo plegable



Para abatir el respaldo, tire de la cinta de seguridad hacia afuera con una mano y empuje con la otra mano el respaldo hacia adelante.




Para volver a la posición normal, lleve el respaldo directamente hacia atrás hasta escuchar el sonido del anclaje que indica la posición correcta y segura del respaldo.

10 Uso y manejo



Para bajar una cuneta, incline hacia atrás la silla pisando el tubo trasero y baje con la silla avanzando hacia adelante lentamente.

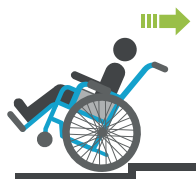

Para subir una cuneta, incline hacia atrás la silla pisando el tubo trasero y suba retrocediendo con cuidado.



Para subir pendientes sin ayuda, se recomienda al usuario inclinar el cuerpo hacia adelante empujando con fuerza los anillos de comando.

Mantenimiento

Para mantener la silla de ruedas en buenas condiciones se recomienda lo siguiente:

- Realizar una limpieza mensual del producto utilizando un paño húmedo con detergente líquido suave. No utilice productos corrosivos ni cepillos duros.
- Lubricar mensualmente partes y piezas mecánicas de su silla de ruedas utilizando productos del mercado.
- Comprobar periódicamente la presión y el estado de los neumáticos. La presión máxima va indicada en el neumático.
- Revise regularmente las fijaciones de las sillas de ruedas, que son las siguientes: tuercas, tornillos, pernos, resortes, etc.
- Solo utilice piezas de recambio originales.
- Se recomienda realizar un Servicio de Mantenimiento General cada 6 meses para mantener su silla de ruedas en óptimas condiciones.
- Diríjase a su servicio técnico autorizado Reharec ante cualquier problema o bien para realizar su servicio de mantenimiento periódico.

Garantía

- Garantía General: 36 MESES.
- Garantía cubre daños estructurales en marco, cruz T y sistemas metálicos anexos por falla de material.
- Todo producto en estado nuevo que presente algún desperfecto será reemplazado. En caso de tener uso, el accesorio que presente el desperfecto será reemplazado o reparado de acuerdo a evaluación realizada por nuestro personal técnico.
- Pérdida de garantía:
 - Uso indebido o maltrato.
 - Manipulación en servicio técnico no autorizado.
 - Accidentes.
- Algunas exclusiones de la garantía:
 - Desgaste natural de neumáticos, pintura y textiles por uso diario de la silla de ruedas.
 - La pérdida de cualquier elemento de la silla.
 - Daños en la pintura producto de rayaduras, roces y/o golpes recibidos.
 - La rotura de textiles.
 - El ajuste o calibrado de sistemas, como frenos, ruedas traseras, ruedas delanteras, paletas apoya pie y en general cualquier sistema móvil.
- Consulte por nuestros Servicios Técnicos autorizados para servicios de mantenimiento de las sillas de ruedas, para la compra de repuestos o bien para arreglos no contemplados en la garantía.