



## **Manual de Uso y Mantenimiento**

### **ANDADOR RECÍPROCO**



[www.rehacare.cl](http://www.rehacare.cl)

## ADVERTENCIAS

Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente las instrucciones de este manual, ya que el mismo fue redactado para su seguridad y guía en el proceso de aprendizaje para un correcto uso y mantenimiento del producto. El Manual de Uso y Mantenimiento es, a todos los efectos, parte integrante del producto y debe ser conservado con cuidado para futuras referencias. El manual provee indicaciones sobre el uso correcto del dispositivo y debe estar acompañado por un conocimiento adecuado del dispositivo para rehabilitación.

- El manual refleja especificaciones técnicas en el momento de la comercialización del producto. REHACARE se reserva el derecho de realizar cualquier modificación al dispositivo y al correspondiente manual que la experiencia sugiera, por consideraciones técnicas o por la evolución de la legislación, sin obligación de actualizar la producción anterior y sus correspondientes manuales.
- El uso y regulación del dispositivo y de sus componentes debe ser controlado y supervisado por personal cualificado, tal como lo establecen la legislación, los reglamentos y las normas vigentes.
- El producto puede ser utilizado sólo por personas que se hayan interiorizado sobre las normas e instrucciones presentes en este manual.
- El entrenamiento para el uso del producto debe ser llevado a cabo en los centros de rehabilitación, con la asistencia de personal competente.
- El dispositivo debe ser utilizado por personas con contextura física y peso conformes a lo especificado en este manual. NO utilizar este dispositivo con personas que tengan un peso mayor al indicado. Capacidad máxima de carga (peso del usuario): 120 kg
- Controlar siempre que en el área en donde se use el producto no haya obstáculos que pudieran provocar inestabilidad y por consiguiente vuelco, tales como alfombras, escalones y cualquier objeto en el suelo. Se deben quitar los adornos y objetos que, accidentalmente, pudieran ser golpeados y caer por el uso del producto.
- Prestar atención a los puntos de peligro en el área de uso del dispositivo. Evitar áreas cercanas a cuencas artificiales y naturales o cursos de agua no protegidos.
- **ASEGURESE** que el andador está completamente abierto y las bisagras desplegadas correctamente.
- Todos los apoyos tienen que estar en contacto con el suelo a la hora de utilizar el andador para que esté equilibrado.
- Para evitar que vuelque: No intente alcanzar objetos si tiene que moverse hacia adelante. No cuelgue objetos de ningún tipo en el andador.
- Si quiere alcanzar o recoger algún objeto debe colocar ambos pies firmemente en el suelo.
- **NO** regular los componentes en posiciones extremas para no comprometer la estabilidad y seguridad del dispositivo.
- **NUNCA** utilizar el dispositivo en superficies irregulares, pendientes pronunciadas o escaleras.
- **NO** permitir que personas ajenas utilicen el dispositivo.
- **NO** levantar el andador para desplazarlo cuando el dispositivo está siendo utilizado por alguien.
- **EVITAR** velocidades excesivas de desplazamiento, especialmente en pisos irregulares para garantizar la estabilidad y la seguridad del dispositivo.

- En caso de **DUDA** sobre la **SEGURIDAD** del producto o los **DAÑOS** de las piezas o componentes, se recomienda **INTERRUMPIR INMEDIATAMENTE EL USO** y **CONTACTAR A REHACARE** directamente.
- **NO** realizar operaciones o maniobras sin estar totalmente seguro de sus consecuencias. En caso de dudas contactar con el servicio de asistencia más cercano o directamente con **REHACARE**.
- **NO** utilizar el dispositivo si alguna de sus partes estuviera dañada, quebrada o faltara.
- Verifique que en el andador que el mango de agarre no esté suelto o tenga algún material que pueda dañarlo.
- Verifique que la base o regatón de goma del andador esté apretada y estable; si el regatón tiene desgaste, debe ser reemplazado.
- Verifique que los pernos o remaches que fijan las distintas partes del andador estén en buenas condiciones y bien apretados.

## INSTRUCCIONES DE USO

Para poder leer y entender este manual, es importante que se familiarice con los términos más comunes que empleamos para las distintas piezas del Andador. El producto contiene:



1. Mango de apoyo o puño
2. Botón o Bloqueo de Cierre
3. Botón o Bloqueo de Altura
4. Tubos de ajuste de altura
5. Regatón de Goma

El Andador viene completo y armado de fábrica. Todo lo que necesita hacer es sacar del embalaje el producto, regular su altura y utilizar, previa capacitación en su centro de rehabilitación.

Lleve el embalaje a un lugar de recepción de residuos adecuado o bien a REHACARE.

### Ajuste de Altura

Ajuste su andador antes de usarlo. En caso de necesitar regular la altura, el andador cuenta con un sistema botón o bloqueo de Altura, en la parte inferior de los cuatro puntos de apoyo al suelo. Asegúrese de colocarse los zapatos que usa habitualmente antes de ajustar la altura del andador. Verifique el ajuste de altura en el caso de utilizar zapatos distintos.

En caso de necesitar regular la altura, recuerde estar en un lugar seguro y cómodo. Presione el botón de Altura con el dedo hasta hundirlo dentro del tubo y suba o baje el tubo de ajuste de Altura de acuerdo a su necesidad. Una vez llegado a la altura deseada, soltar el botón de Altura y asegurarse de que salga completamente por el agujero deseado (escuchar el click de bloqueo). Recuerde que cada separación entre los agujeros es de 2,5 cm).

## Modo de Uso

### Caminar con el Andador

Para un apoyo y un desplazamiento óptimos, colóquese en posición totalmente erguido con el andador pegado al cuerpo, desplace el andador hacia adelante y luego avance usted hasta llegar nuevamente con el cuerpo al andador. Mire hacia adelante al momento de desplazarse. No deslice el andador demasiado alejado de su cuerpo, podría provocar una caída y descompensar las cargas.

### Desplegar el Andador

El andador se bloquea automáticamente en posición de apertura total.

Apriete el botón en la barra superior para plegar el andador.

Antes de usar el andador, asegúrese de que el mecanismo de plegado se encuentre fijo en su posición.

Tenga cuidado de no hacerse daño cuando despliegue el andador.

### Plegar el Andador

El andador se bloquea automáticamente en la posición de plegado total.

Apriete el botón de Cierre ubicado en barra superior para plegar el andador.

Tenga cuidado de no hacerse daño cuando pliegue el andador.

### Levantar y Transportar el Andador

El acceso a los mangos es más cómodo con el andador plegado.

Pliegue el andador antes de levantarlo pues es la mejor forma y más sencilla de hacerlo por la relación entre el peso y los mangos.

### Uso del Andador

Tenga cuidado de no hacerse daño cuando pliegue y despliegue el andador.

## Mantenimiento

- No exponer a temperaturas extremas (muy altas o muy bajas), humedad o agua, para evitar deformaciones de las piezas de plástico y para evitar que el usuario pueda quemarse en contacto con el metal.
- **REALIZAR LIMPIEZA** regular con un limpiador neutro y limpie con un paño limpio y suave.
- **REVISE** que el andador funcione correctamente y está en buen estado. En el caso de presentar piezas sueltas o dañadas, no lo utilice y llévelo al Servicio Técnico para su revisión.
- Reemplace el regatón de goma ubicado en los puntos de apoyo cuando estén gastados o dañados.

## **Almacenamiento**

Este producto debe almacenarse en un ambiente seco y ventilado.

## **Transporte**

Se debe evitar la presión intensa, la luz solar directa, la lluvia o la nieve.

## **Vida Útil**

En condiciones normales de uso, los andadores están diseñados para una vida útil de al menos 2 años.



Las Dalias 3193, Macul, Santiago.  
[www.rehacare.cl](http://www.rehacare.cl)